

BISOKU修正時の**注意事項**

オーダーメイドインソール「BISOKU」を継続的に使用頂ければ、足底を本来の正常な形に矯正する力が働きます。

その為、足底の機能を取り戻すようにアプローチをかけていますので、使用初期には普段使われていない筋肉が働き出し、張りや疲れなどの症状を感じる場合があります。

痛みの出た場合は、使用者様とご相談のうえ、1日程度、使用を中止して、改めて使用を再開してください。それでも痛みを感じる場合は、インソールを修正しますので、以下2点の対応をお願いします。

- ① 修正指示所をメールもしくはFAXしてください。

E-mail⇒bisoku@hitotsuyama-hd.co.jp

FAX. 052-875-8802

- ② インソールを指定住所に返送してください。

【佐川急便「着払い」にて発送ください。】

■返送先

〒581-0081 大阪府八尾市南本町9-9-24 鈴木義肢装具㈱ 宛

■**注意事項**

多少の違和感がでるのは改善の兆候ですので、経過観察をしてください。

痛みが局所的に出て、歩くのがつらい等の場合は、修正対応を致します。

⇒見本を参考に、修正箇所をご指示ください。

見本 インソールB I S O K U修正指示書

佐川問合せ送り状N o 123456789


店舗名	患者名	注文番号
〇〇〇接骨院	山田 太郎	〇〇〇〇〇
何をしている時に痛み感じますか？	ジョギング中	
どこが痛い	① 右足の土踏まず（下記の図を参照） ② 左足のかかと（下記の図を参照）	
使用用途	ランニング用	

修正したい箇所に「シールを貼り、文章で説明」してください。

※インソール裏側にシールを貼る

右裏

左裏

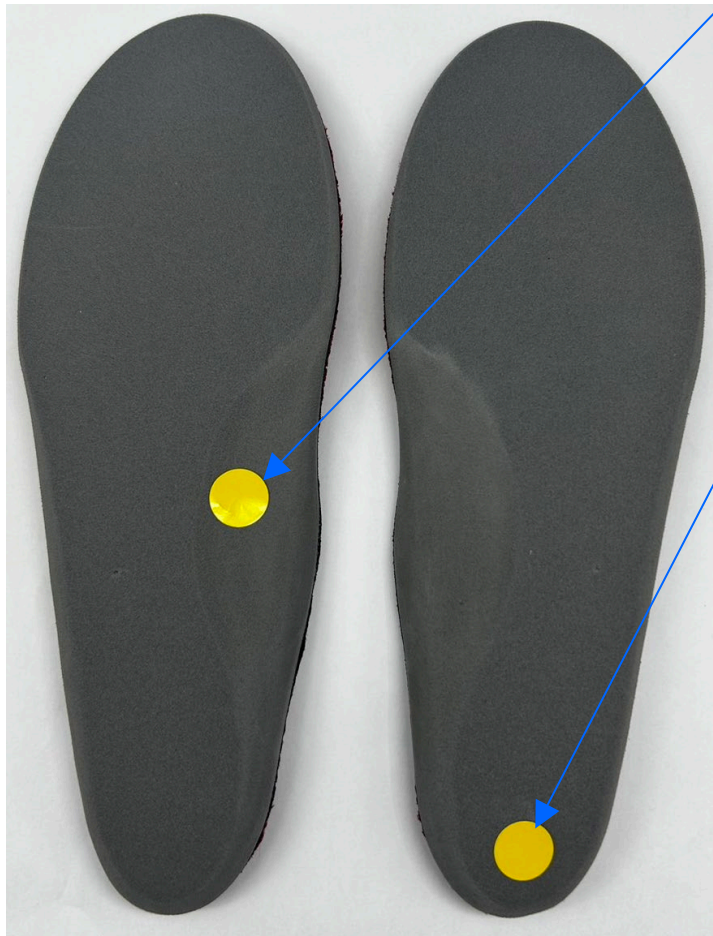

【修正指示①】

「右足の土踏まず」を1ミリ程度 削ってほしい。

【症状①の説明】

10分くらい走ると右の土踏まずの中足骨周辺に当たり痛い。一週間様子をみたが変わりがなく、ふくらはぎに張りを感じるようになった。

【修正指示②】

「左足のかかと」を2ミリ程度 削ってほしい。

【症状②の説明】

踵重心で少し後ろに倒れる感じがするので、2ミリ上げて下さい。

印の箇所が少し当たって痛いので、2ミリくらい広げて下さい。等

※痛みを改善する為に、インソールを削る場合、通常2～3ミリ程度です。（最大で、5ミリが限界です。）

インソールB I S O K U修正指示書

佐川問合せ送り状No

店舗名	患者名	注文番号

何をしている時に痛み感じますか？	
どこが痛い	
使用用途	

修正したい箇所に「シールを貼り、文章で説明」してください。

※インソール裏側にシールを貼る

※痛みを改善する為に、インソールを削る場合、
通常2～3ミリ程度です。
(最大で、5ミリが限界です。)